

RETYPEPEEL®




Il peeling biorivitalizzante e liftante
di nuova generazione

acido tricloroacetico | acido cogico | acido mandelico

Il cuore della tecnologia di

REVYPEEL®

REVYPEEL® è un dispositivo medico di Classe IIa progettato per ottenere una stimolazione dermo-epidermica dei fibroblasti, senza irritare lo strato superficiale della pelle.

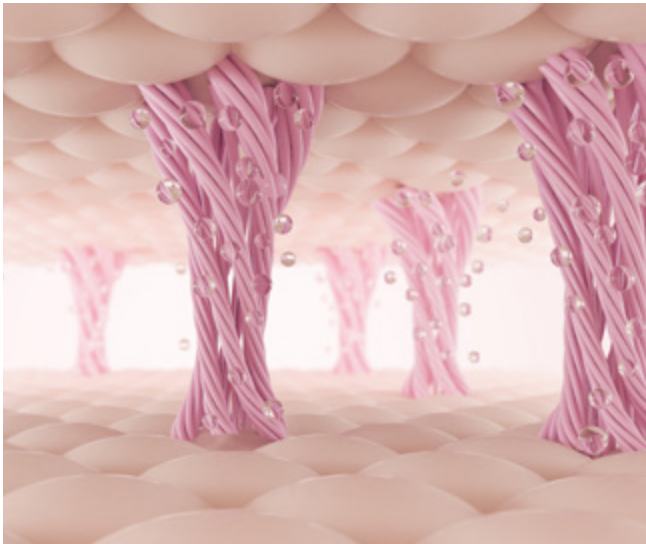

L'efficacia

Grazie alla combinazione sinergica di **acido tricloroacetico (TCA)**, **acido mandelico** e **acido cogico**, **REVYPEEL®** tratta in modo efficace:

- i segni del **foto- e crono-invecchiamento**
- le **lesioni acneiche** e le **cicatrici**
- le **discromie cutanee** e le **macchie pigmentarie**
- le **smagliature** e le **irregolarità di tono e texture**

Adatto a tutte le età, **REVYPEEL®** non richiede aghi, non crea frost, non genera downtime: un vantaggio clinico che i pazienti comprendono immediatamente.

MADE IN ITALY



Un'unica formula, due concentrazioni specifiche: REVYPEEL LOW e REVYPEEL HIGH

REVYPEEL
HIGH

Stimolo profondo per risultati visibili e duraturi

Peeling chimico superficiale con **più alta concentrazione di TCA**, capace di agire su tutto lo spessore dell'epidermide.

Specificamente formulato per trattare:

- **cheloidi e cicatrici ipertrofiche**
- **esiti cicatriziali di acne**
- **discromie importanti e melasma**
- **smagliature e cicatrici profonde**

Rimuovendo gli strati cutanei più danneggiati, **REVYPEEL HIGH stimola la rigenerazione cellulare profonda**, riducendo rughe, cicatrici e macchie, e restituendo una **pelle più compatta, uniforme e luminosa**.

REVYPEEL
LOW

Azione superficiale, stimolo profondo

Un peeling chimico superficiale che agisce sullo **strato corneo e granuloso dell'epidermide**, indicato per:

- **lesioni acneiche lievi**
(papule, pustole, noduli, cisti)
- **discromie leggere**
- **rughe sottili e texture irregolare**

La sinergia dei suoi acidi **stimola il turnover cellulare, riduce le cicatrici superficiali e uniforma il colorito**, senza indurre effetto frost.

REVYPEEL LOW agisce come una **biorivitalizzazione non iniettiva**, attivando un processo di **rigenerazione naturale**. Può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri trattamenti medico-estetici.

COMPOSIZIONE

ACIDO TRICLOROACETICO
(20%)

ACIDO MANDELICO

ACIDO COGICO

ECCIPIENTI



COMPOSIZIONE

ACIDO TRICLOROACETICO
(12%)

ACIDO MANDELICO


ACIDO COGICO

ECCIPIENTI

I principi attivi

Una sinergia efficace

REVPYPEEL®

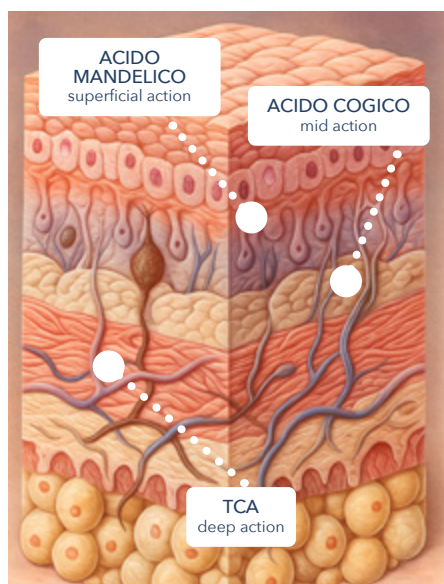

Acido Mandelico

Idratante, rigenerante, battericida, nutriente. Favorisce la produzione di collagene ed elastina, migliorando tono e texture cutanea.

Acido Tricloroacetico (TCA)

Cheratolitico, illuminante, stimolante e battericida. Promuove l'esfoliazione controllata e la sintesi di nuovo collagene, migliorando compattezza e luminosità.

Acido Cogico

Illuminante, depigmentante e idratante. Agisce come potente inibitore della tirosinasi, riducendo la sintesi di melanina e contrastando le discromie.



I punti di forza

- Senza aghi, **non invasivo** e **indolore**
- **Nessun effetto "frost"**
- **Non fotosensibilizzante**, utilizzabile tutto l'anno (LOW)
- **Adatto a tutti i fototipi (I-VI)** e a tutte le età
- Stimola la **rigenerazione** e il **rimodellamento tissutale**
- Dona **luminosità, compattezza** e **uniformità**

Da eseguire esclusivamente da personale medico o sotto supervisione medica

Indicazioni cliniche

CRONO-INVECCHIAMENTO

RENDE I TESSUTI PIÙ COMPATTI,
LEVIGATI E LUMINOSI

DISCROMIE

SCHIARISCE LE MACCHIE CUTANEE
INIBENDO LA TIROSINASI

FOTO-INVECCHIAMENTO

RIDUCE LE MACCHIE E LE DISCROMIE

CICATRICI

LEVIGANTE E RISTRUTTURANTE

ACNE

AZIONE LENITIVA, ANTIBATTERICA E
ANTINFIAMMATORIA

SMAGLIATURE

MIGLIORA ELASTICITÀ
E ASPETTO CUTANEO

REVYSKIN

Linea Complementare



Lozione Pre-Peeling

Uniforma il pH cutaneo,
preparando la pelle all'azione
del peeling.



Gel Neutralizzante

Formula alcalina (pH 9) che
blocca e neutralizza l'azione
chimica di **REVYPEEL®**



Crema Post Peeling SPF 50+

Protegge, lenisce e rigenera la
pelle dopo il trattamento.
Previene la formazione di macchie
e i danni da foto-invecchiamento.

Il protocollo di trattamento

1

SOLUZIONE PREPARATORIA

Equilibrare il pH cutaneo prima dell'applicazione.

2

APPLICAZIONE DI

REVYPEEL®

Distribuire uniformemente e massaggiare energicamente per favorire la penetrazione degli attivi.

3

SOLUZIONE NEUTRALIZZANTE

Tamponare con il gel specifico per interrompere l'azione chimica.

4

CREMA LENITIVA POST PEELING

Favorire idratazione, protezione e comfort immediato.

Effetti visibili già dopo la prima seduta:

BIO-RIVITALIZZANTE

ILLUMINANTE

SCHIARENTE

BATTERICIDA

LIFTANTE



Risultati clinici

L'uso regolare di **REVYPEEL®** consente di:

- Contrastare il foto- e crono-invecchiamento
- Ridurre rughe sottili e profonde
- Rivitalizzare derma ed epidermide
- Schiarire e uniformare l'incarnato
- Aumentare l'idratazione cutanea
- Migliorare acne e cicatrici
- Attenuare smagliature e melasma

Sinergie

REVYPEEL® può essere utilizzato come **trattamento autonomo**, o **in combinazione sinergica con altri protocolli** medico-estetici per potenziarne l'efficacia.

TRATTAMENTO ASSOCIATO	QUANDO UTILIZZARE REVYPEEL®
Iniettabili/biorivitalizzazione	Prima
Botox	Prima
Microneedling/Oxyneedling	Prima
Trattamenti topici	Prima
Radiofrequenza frazionata/Laser	Prima
Carbossiterapia/Ossigeno	Prima
Fili PDO	Prima
Crioterapia	Prima
PRP	Prima
Nanoneedling	Dopo
IPL	Dopo

Consumi medi di prodotto per trattamento

Per supportare il medico nella corretta pianificazione dei protocolli di seguito vengono riportate le **quantità medie di prodotto** generalmente utilizzate per una singola seduta di trattamento **REVYPEEL®**, in base all'indicazione clinica trattata.

PRODOTTO	VISO/COLLO/ DÉCOLLETÉ	ACNE	CICATRICI	CHERATOSI*	SMAGLIATURE*
REVYPEEL LOW	1.5 ml - 2 ml	2 ml	–	1.5 ml	–
REVYPEEL HIGH	1.5 ml	–	1.5 ml	1 ml	3.5 ml
Pre-Peeling Lotion	5 ml	5 ml	5 ml	5 ml	5 ml
Neutralizing Gel	5 ml	5 ml	5 ml	5 ml	10 ml
Post-Peeling Cream	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	4 ml

* Le quantità possono variare in funzione dell'estensione dell'area trattata.

Questi valori rappresentano una stima orientativa, utile per programmare in modo accurato il numero di trattamenti possibili con ciascun flacone e per definire in anticipo i cicli terapeutici del paziente.

REVYPEEL® rappresenta una nuova frontiera
nel ringiovanimento cutaneo medico, unendo potenza chimica
e delicatezza d'azione in un unico gesto.

Un trattamento sicuro, versatile e ripetibile tutto l'anno,
in grado di rigenerare la pelle in profondità e restituirle
una bellezza autentica, compatta e luminosa.



REVYPEEL®

Distributore esclusivo per l'Italia:

FAIMED

FAIMED è un marchio AVEF GROUP srl
Via Riviera di Chiaia, 23 - 80121 Napoli
www.faimed.it - assistenza@faimed.it - (+39) 3920591662

mbe

MBE è UN MARCHIO G. TRADING COMPANY

Revypeel® è un marchio registrato di G. Trading. FAIMED
è il distributore esclusivo per il mercato italiano.
È vietata la vendita o distribuzione al di fuori dei canali autorizzati.